



 SunTech® **Vet30™**
VITAL SIGNS



Monitor de Sinais Vitais Contínuos
para Animais de Estimação

SunTech Vet30

Com rapidez e praticidade, o monitor SunTech® Vet30™ realiza medições confiáveis da pressão arterial (PA), saturação de oxigênio (SpO₂) e temperatura durante o monitoramento de animais de estimação pré e pós-procedimentos veterinários. Os intervalos podem ser configurados para fazer as leituras de PA automaticamente durante um período de monitoramento. Utilizando a confiável tecnologia Advantage™ VET BP da SunTech, o Vet30 executa silenciosamente medições PA tolerantes ao movimento e fornece resultados precisos. Além disso, o dispositivo fornece medições contínuas da temperatura e SpO₂. A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos necessários para revisar, analisar e transferir os dados dos sinais vitais.

Características padrão

Três em um: A confiável tecnologia SunTech PA para uso veterinário agora com medições de oximetria de pulso e temperatura.

Praticidade: Tela sensível ao toque, com interface intuitiva e colorida.

Precisão: O algoritmo da PA foi desenvolvido exclusivamente para animais de estimação por especialistas em uma das melhores instituições de medicina veterinária.

Monitoramento contínuo:

O monitoramento durante procedimentos é simples, com intervalos definidos pelo usuário para a medição PA.


Portabilidade: Quando alimentado por bateria, o dispositivo pode ser facilmente movido para diferentes locais de monitoramento.

Recarregável: A bateria é recarregada quando o dispositivo está conectado à alimentação CA, reduzindo o desperdício da bateria.

Memória: Até 960 pontos de dados são salvos e mantidos mesmo quando o dispositivo está desligado. O usuário pode selecionar medições específicas da memória do dispositivo e calcular, de forma automatizada, as médias da PA.

Transferência de dados:

Os dados podem ser transferidos para um software aplicativo para análise de tendências e geração de relatórios para computador através de conexão Bluetooth. Use o aplicativo para PC para exportar relatórios em formato PDF ou CSV.

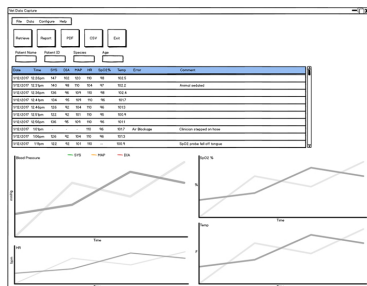



Especificações técnicas

O Vet30 inclui

- Monitor do sistema Vet30
- Capa protetora nas cores rosa-flamingo, azul-pavão ou verde-ervilha
- Manguitos veterinários para pressão arterial nos tamanhos 1-6
- Mangueira do paciente, 1,8 m
- Sonda de temperatura AccuVet™
- Sensor de SpO₂ lingual com cliques
- Adaptador CA

Especificações gerais

Sistólica: 40 a 265 mmHg
Diastólica: 20 a 200 mmHg
Pressão arterial média: 27 a 222 mmHg
Frequência cardíaca: 25 a 300 bpm
Peso do dispositivo: aprox. 1200 gramas (com bateria)

Dimensões: 15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm

Garantia: 2 anos para o monitor
 1 ano para acessórios AccuVet
 6 meses para acessórios Masimo

90 dias para manguitos/
 mangueiras

AccuVet

Intervalo de temp.: 0 °C a 50 °C

Precisão da temp.: ±0,1 °C mais a tolerância do sensor de temperatura

Sensor de temp.: Compatível com YSI 400

Intervalo de SpO₂: 0-99% – SpO₂ funcional

Precisão da SpO₂: ±2 a 70 - 99%, inferior a 70% é indefinido

Intervalo de frequência de pulso: 18-400 bpm

Precisão da frequência de pulso: ±2% ou 2 bpm, o que for maior

Masimo™

Intervalo de SpO₂: 0-100%

Precisão da SpO₂: ±2% quando sem movimentos
 ±3% a perfusão baixa

Intervalo de frequência de pulso: 0-239 bpm

Precisão da frequência de pulso: ±3 bpm quando sem movimentos

Acessórios

Capa do SunTech Vet30

A capa protetora removível é disponível em 3 cores e possui uma alça de fácil manuseio.



Rosa-flamingo



Azul-pavão



Verde-ervilha

Adaptador CA

O Vet30 é um dispositivo portátil que pode ser facilmente deslocado de um ambiente para outro quando necessário. Basta conectar o adaptador CA para recarregar a bateria de íon de lítio ao Vet30. O adaptador CA vem com 4 padrões de plugues de tomadas, atendendo à maioria dos requisitos internacionais de energia.

Temperatura e SpO₂

AccuVet Termometria



AccuVet SpO₂ ou Masimo SET® SpO₂



Manguitos para uso veterinário SunTech



A solução em manguitos é composta de materiais macios e tem os cantos arredondados, proporcionando conforto ao usuário. Os manguitos SunTech para medição da PA são codificados por cores, para definição rápida do tamanho, e os indicadores de alcance garantem dimensionamento e encaixe precisos. O Vet30 PA vem com manguitos de tamanho 1-6.

A linha de manguitos PA vet da SunTech pode ser usada com outros monitores de PA veterinários! Saiba mais sobre nosso kit de conversão de manguitos SunTech Vet.


SunTech Medical®
The Difference in Clinical Grade™

Com mais de 30 anos dedicados a desenvolver nossa tecnologia de pressão arterial avançada, temos certeza de que nunca perdemos o compasso - e você também não vai perder. É nosso legado. Somos a SunTech Medical. **É a diferença de padrão clínico.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 EUA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301
SunTechMed.com

EC REP

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Inglaterra
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong China 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (vendas)
+ 86.755.29588665 (assistência técnica)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN



82-0520-06 MA Rev.A



Números de peças do SunTech Vet30

Monitores do sistema Vet30

99-0171-00	Monitor Vet30 com AccuVet SpO ₂ , capa na cor rosa-flamingo
99-0171-01	Monitor Vet30 com AccuVet SpO ₂ , capa na cor azul-pavão
99-0171-02	Monitor Vet30 com AccuVet SpO ₂ , capa na cor verde-ervilha
99-0172-00	Monitor Vet30 com Masimo SpO ₂ , capa na cor rosa-flamingo
99-0172-01	Monitor Vet30 com Masimo SpO ₂ , capa na cor azul-pavão
99-0172-02	Monitor Vet30 com Masimo SpO ₂ , capa na cor verde-ervilha

Linha veterinária de manguitos de PA da SunTech

98-0400-80	Manguito N°1	caixa com 20	alcance de 3-6 cm
98-0400-81	Manguito N°2	caixa com 20	alcance de 4-8 cm
98-0400-82	Manguito N°3	caixa com 20	alcance de 6-11 cm
98-0400-83	Manguito N°4	caixa com 20	alcance de 7-13 cm
98-0400-84	Manguito N°5	caixa com 20	alcance de 8-15 cm
98-0400-F1	Manguito N°6	caixa com 20	alcance de 12-19 cm
98-0400-F3	Manguito N°7	caixa com 20	alcance de 17-25 cm
98-0240-00	Manguitos 1-6	embalagem com 6	
91-0028-75	Mangueira do paciente, 1,8 m		
91-0028-76	Mangueira do paciente, 3 m		

Temperatura

52-0022-00	AccuVet 2 m, sonda de temperatura
52-0023-00	AccuVet 3 m, sonda de temperatura

SpO₂

52-0019-00	AccuVet 2 m, sensor lingual de SpO ₂ com dois cliques
52-0020-00	AccuVet 1,8 m, sensor retal de SpO ₂ por refletância
52-0021-00	AccuVet 2 m, cabo de extensão do sensor de SpO ₂
52-0024-00	Masimo 0,9 m, M-LNCS™ sensor de SpO ₂ YI AH com 3 cliques
52-0026-00	Masimo 0,9 m, M-LNCS™ sensor de SpO ₂ TF-I AH (transrefletância)
52-0012-01	Masimo 3 m cabo do paciente série M-LNCS™
52-0025-00	Cliques de reposição Masimo AH SpO ₂ (3 tamanhos)

Acessórios

39-0195-00	Capa na cor rosa-flamingo
39-0195-01	Capa na cor azul-pavão
39-0195-02	Capa na cor verde-ervilha
19-0020-00	Adaptador CA
98-0900-01	Substituição da bateria de íon de lítio

Números de peças do SunTech Vet30 (continuação)

Programa de Garantia Estendida

83-0023-00 Garantia de um ano estendida

83-0023-01 Garantia de três anos estendida

Termos e Condições da Garantia Estendida

A garantia estendida pode ser adquirida:

- No ato da compra original
- Antes da expiração do período de garantia inicial