


## Anleitung zum korrekten Anlegen der Orbit-K™-Manschette


### Schritt 1

Errasten Sie die Oberarmarterie (A. brachialis) zwischen Bizeps und Trizeps.

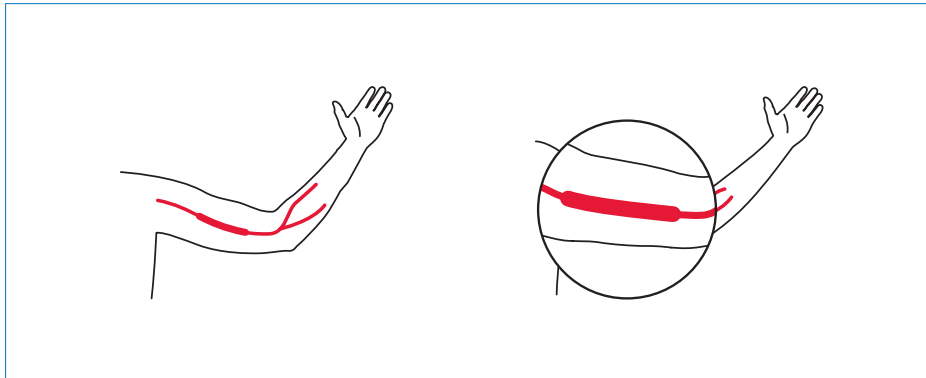


### Schritt 2

Wählen Sie die Manschette mit der richtigen Größe. Auf der Manschette finden Sie innen und außen Bereichsmarkierungen, mit deren Hilfe Sie die richtige Größe bestimmen können.

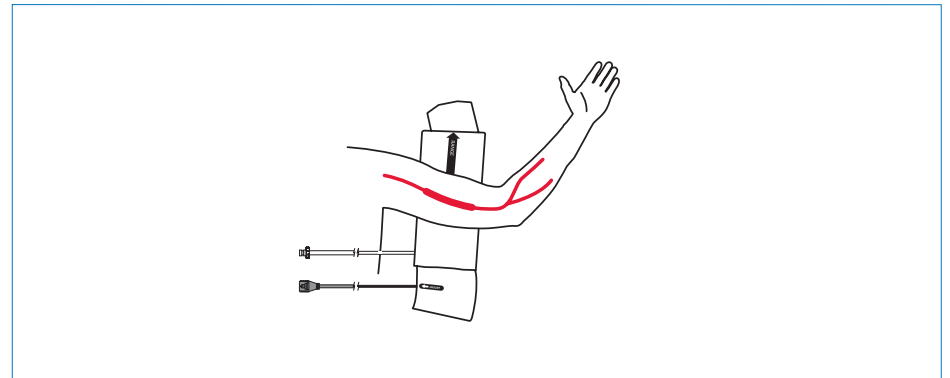


### Schritt 3

Legen Sie die Manschette am Arm an. Die "Artery"-Markierung muss zum Handgelenk zeigen, das Mikrofon muss über der A. brachialis liegen - etwa 3...5 cm oberhalb der Ellenbeuge.

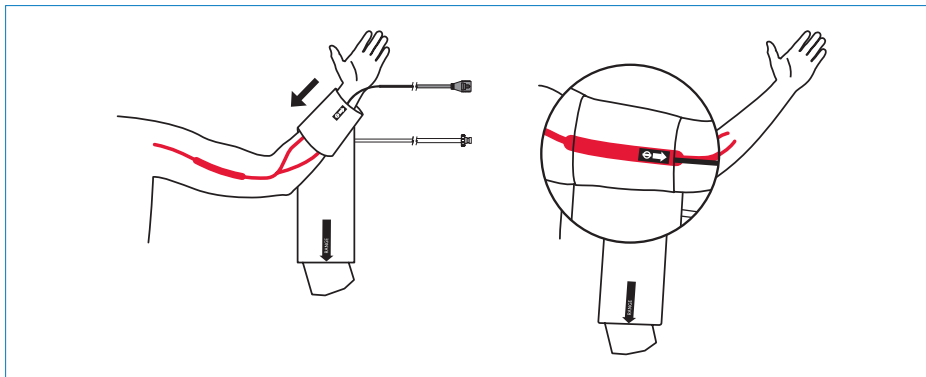

### Schritt 4


Wickeln Sie die Manschette fest um den Arm. Fixieren Sie *Patientenleitung und Mikrofonkabel mit den Handgelenkbändern, die mit dem Tango M2 geliefert wurden*, am Handgelenk des Patienten wie unten gezeigt.

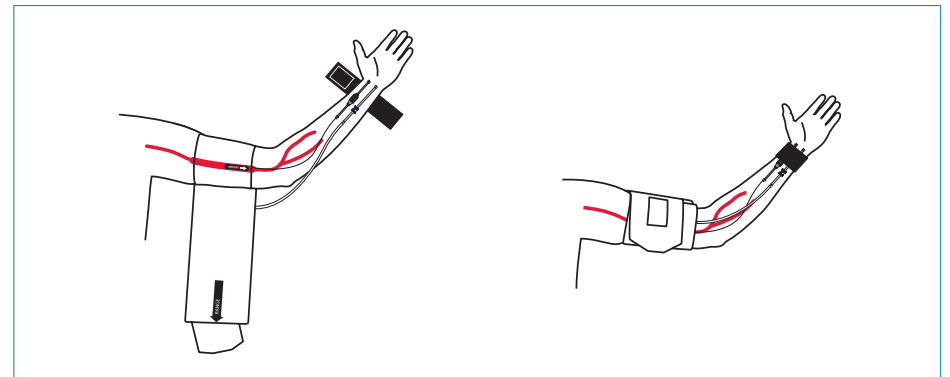

# Anleitung zum korrekten Anlegen der Einmal-Manschette


## Schritt 1

Setzen Sie das Mikrofon auf das Haftpad wie unten gezeigt. Die Haftfläche fixiert das Mikrofon auf dem Pad.

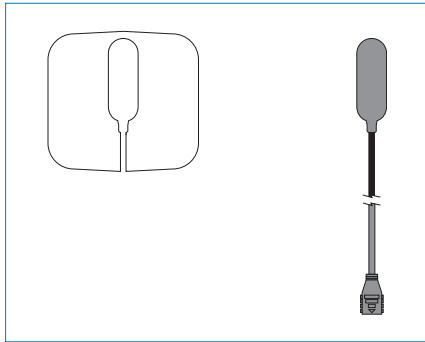


## Schritt 2

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Mikrofon-Haftpad ab.

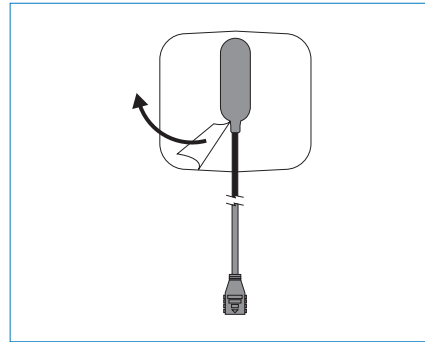


## Schritt 3

Die korrekte Position des Mikrofons ist eine wesentliche Voraussetzung für die Funktion des *Tango M2*. Platzieren Sie das Mikrofon über die A. brachialis, zwischen Bizeps und Trizeps (etwa 2 Fingerbreit über der Armbeuge).

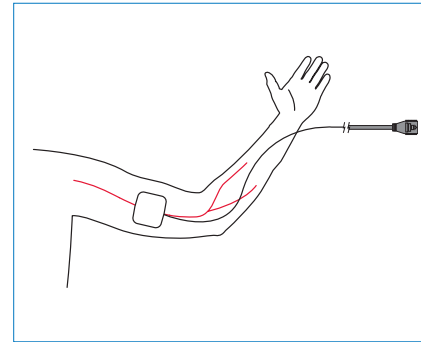


## Schritt 4

Wählen Sie eine *SunTech* Einmal-Manschette der passenden Größe. Auf der Manschette finden Sie innen und außen Bereichsmarkierungen, mit deren Hilfe Sie die richtige Größe bestimmen können.

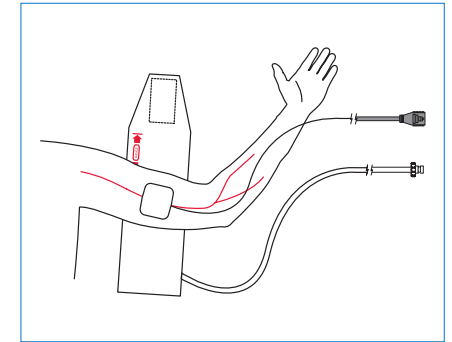


## Schritt 5

Wickeln Sie die Manschette fest um den Arm. Die Markierung für die Arterie sollte wie unten gezeigt über der A. brachialis liegen

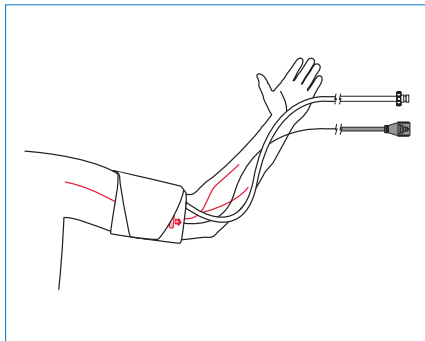


## Schritt 6

Schließen Sie das Mikrofonkabel am Stecker an wie unten gezeigt. Die Einsteckrichtung spielt keine Rolle. Das Kabel muss hörbar einrasten.

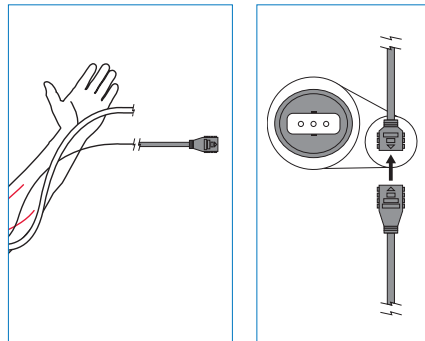

## Schritt 7

Schließen Sie den Manschettenschlauch an die Patientenleitung des *Tango M2* an wie unten gezeigt.

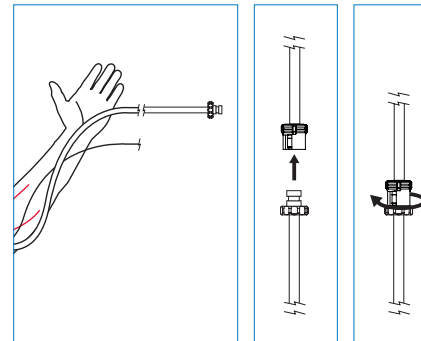

## Schritt 8

Fixieren Sie *Patientenleitung* und *Mikrofonkabel* mit den *Handgelenkbändern*, die mit dem *Tango M2* geliefert wurden, am Handgelenk des Patienten wie unten gezeigt.

