


Guía para la correcta colocación del manguito Orbit-K™


Paso 1

Palpe la arteria braquial, entre el bíceps y el tríceps.

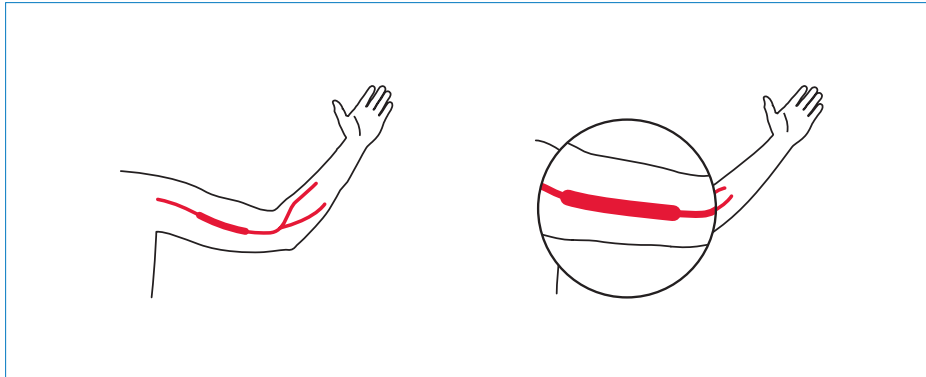


Paso 2

Elija el tamaño de manguito apropiado. El manguito tiene unas marcas de colocación tanto en la parte interna como en la externa, para elegir un tamaño adecuado.

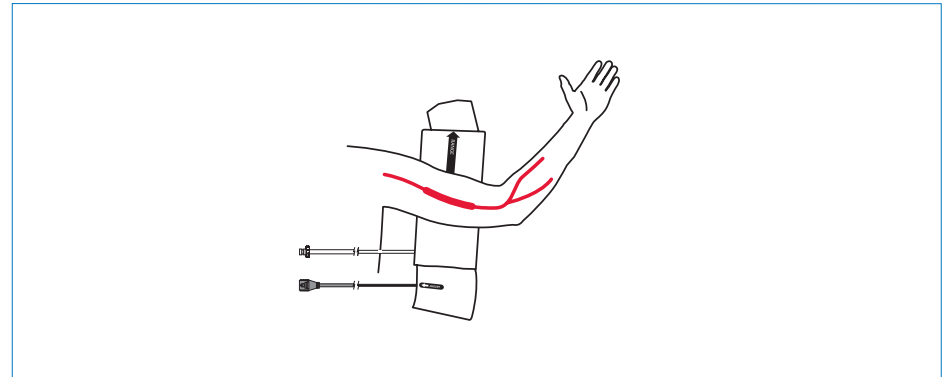


Paso 3

Coloque el manguito en el brazo. Asegúrese de que la parte que representa la arteria queda mirando hacia abajo y que el micrófono se coloca sobre la arteria braquial, a una distancia de 3 a 5 cm del codo.

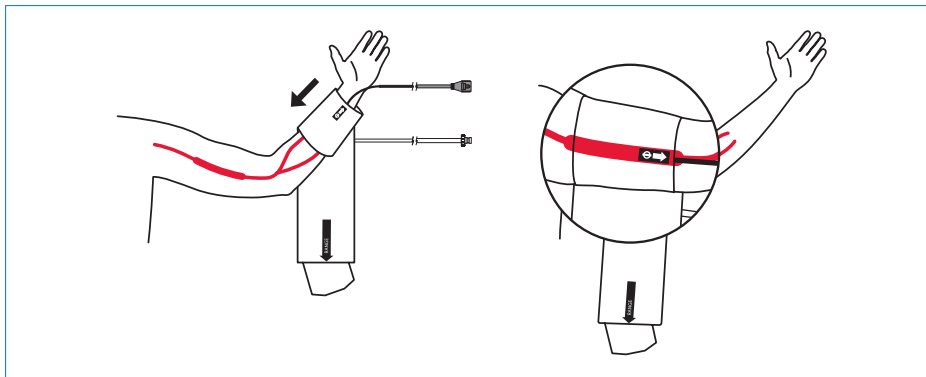

Paso 4


Coloque el manguito alrededor del brazo y ajústelo. Utilice las muñequeras suministradas con el monitor *Tango M2* para fijar tanto el cable del paciente como el cable del micrófono a la muñeca del paciente, tal y como se muestra a continuación.

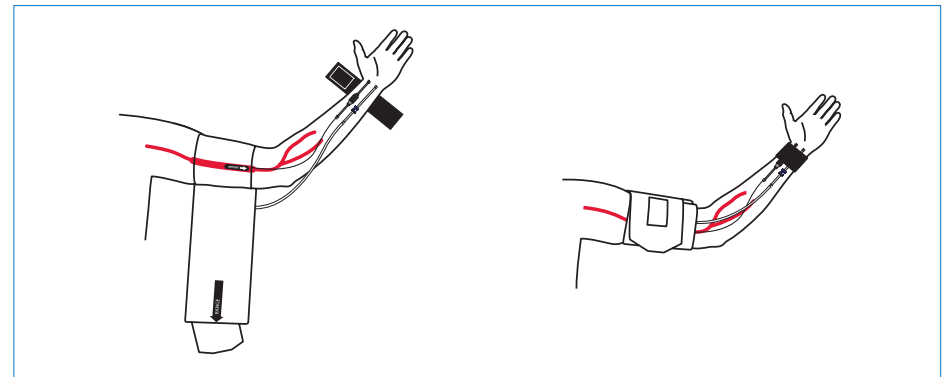

Guía para la correcta colocación del manguito de uso en un solo paciente


Paso 1

Coloque el micrófono sobre el fijador del micrófono como se indica. La superficie adhesiva del fijador mantendrá el micrófono en el interior.

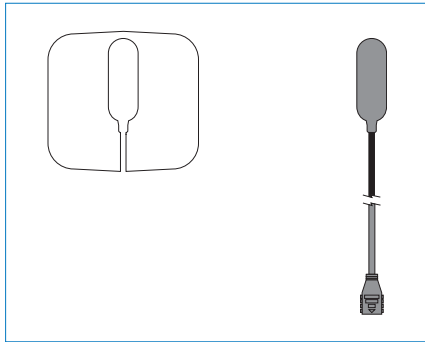


Paso 2

Despegue la cubierta protectora del fijador del micrófono tal y como se indica debajo.

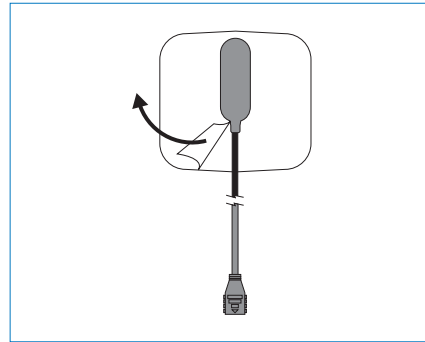


Paso 3

La colocación del micrófono es crucial para el buen funcionamiento del *Tango M2*. Coloque el micrófono sobre la arteria braquial, entre los músculos bíceps y tríceps (a unos dos dedos de la flexura del codo).

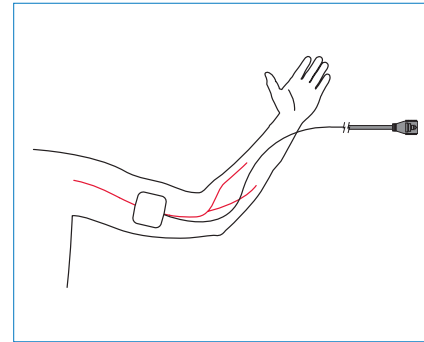


Paso 4

Elija el tamaño adecuado del manguito *desechable de SunTech*. El manguito tiene unas marcas de colocación tanto en la parte interna como en la externa para elegir un tamaño adecuado.

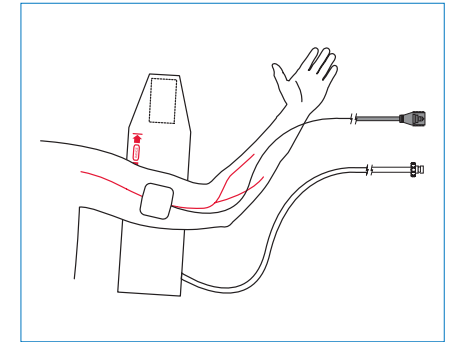


Paso 5

Asegure bien el manguito alrededor del brazo. La marca que representa la arteria debe estar sobre la arteria braquial, tal y como se muestra a continuación.

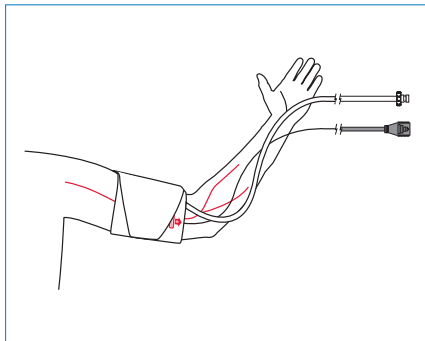


Paso 6

Acople el cable del micrófono al conector, tal y como se indica debajo. Los conectores se pueden introducir orientados de cualquier manera. Se escuchará un clic cuando queden bien conectados.

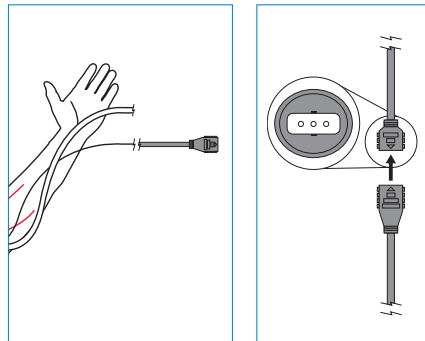

Paso 7

Acople el tubo del manguito al conector del cable del paciente del *Tango M2*, según se indica aquí.

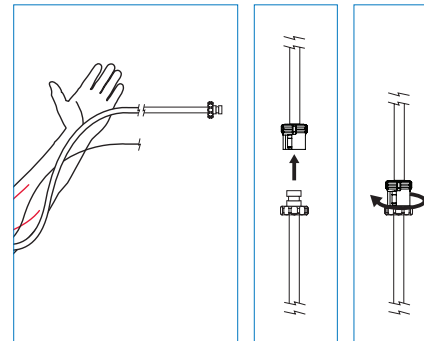

Paso 8

Utilice las muñequeras suministradas con el monitor *Tango M2* para fijar tanto el cable del paciente como el cable del micrófono a la muñeca del paciente, tal y como se muestra a continuación.

