


## Instrukcja prawidłowego zakładania mankietu Orbit-K™


### Etap 1

Zlokalizuj tętno ramienną pomiędzy mięśniami dwugłowym a trójgłowym.

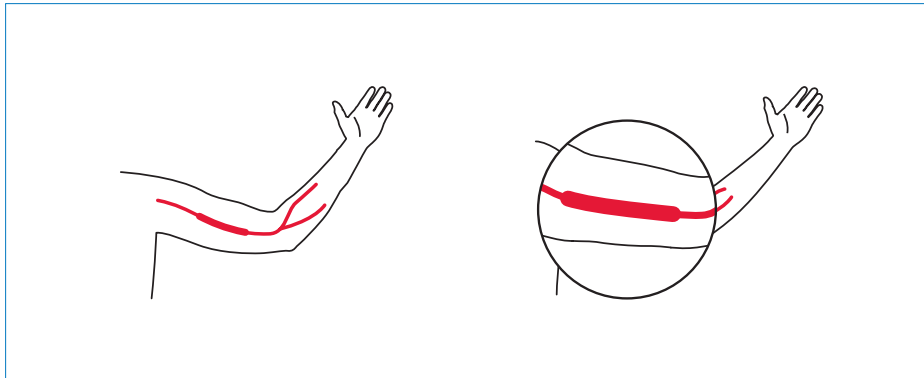


### Etap 2

Wybierz odpowiedni rozmiar mankietu. Mankiet ma znaczniki zakresu po obydwu stronach - wewnętrzną i zewnętrzną, aby zapewnić prawidłowy dobór rozmiaru.

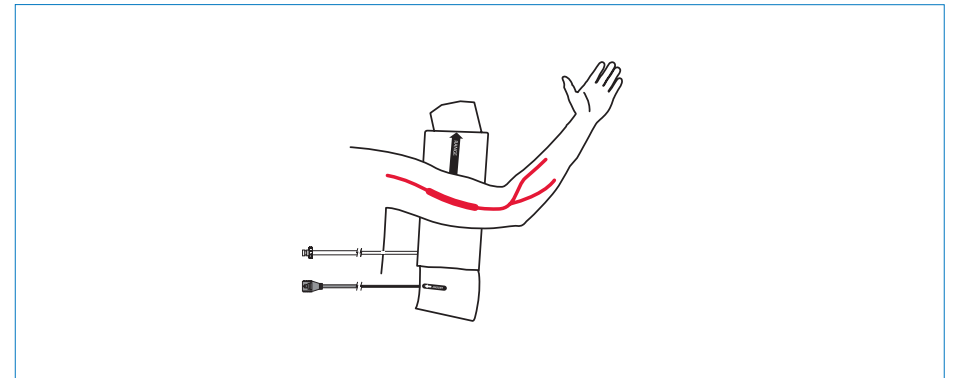


### Etap 3

Załóż mankieta na ramię pacjenta. Upewnij się, że znacznik oznaczający tętno skierowany jest w dół, w stronę nadgarstka, a mikrofon umieszczony jest nad tętno ramienną, 3 do 5 cm powyżej łokcia.

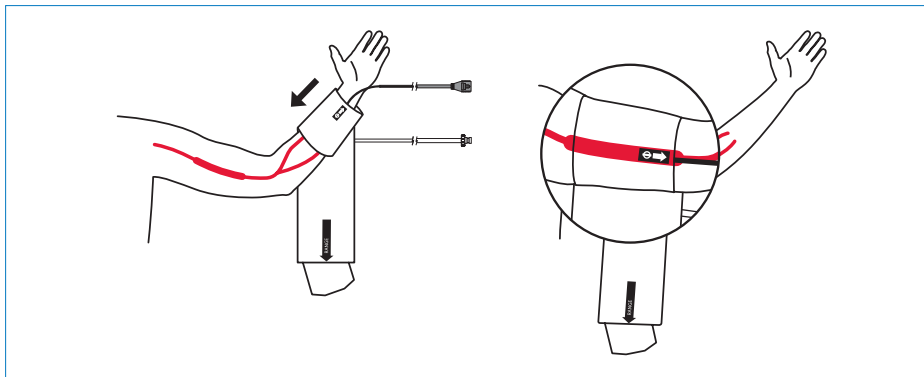

### Etap 4


Owiń dokładnie mankieta wokół ramienia. Użyj pasków nadgarstkowych dostarczonych wraz z systemem Tango M2, aby umocować kabel pacjenta i kabel mikrofonu do nadgarstka pacjenta, jak pokazano poniżej.

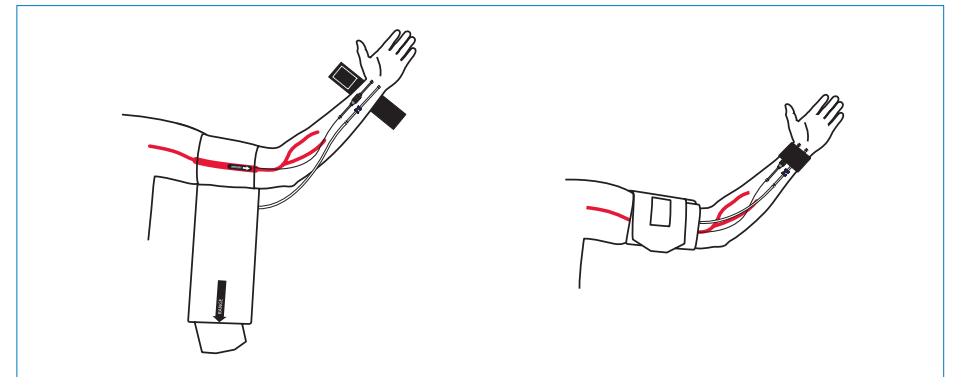

# Instrukcja prawidłowego zakładania mankietu jednorazowego ułtytku dla jednego pacjenta


## Etap 1

Umieć mikrofon na podkładce do mikrofonu. Samoprzylepna powierzchnia przytrzyma mikrofon wewnątrz podkładki.

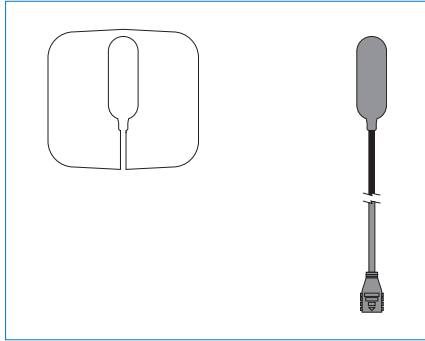


## Etap 2

Zdejmij folię ochronną z podkładki do mikrofonu, jak pokazano poniżej.

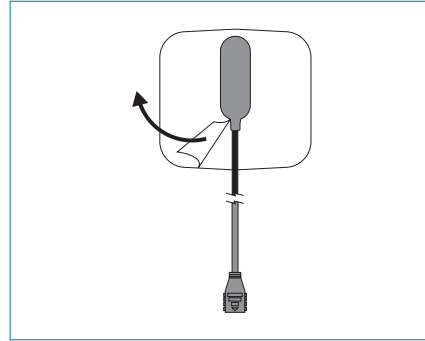


## Etap 3

Umieszczenie mikrofonu ma zasadnicze znaczenie dla działania urządzenia Tango M2. Umieść mikrofon nad łokciem ramieniem, pomiędzy ramieniem dwugłowym a trójgłowym (w przybliżeniu 2 palce ponad zgłciem łokciowym).

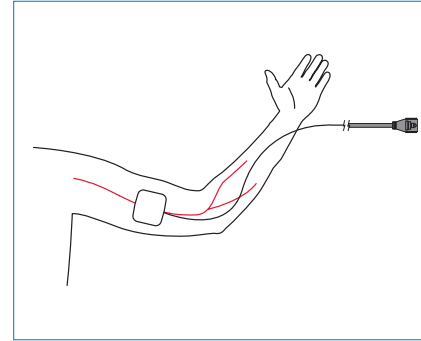


## Etap 4

Dobierz odpowiedni rozmiar jednorazowego mankietu SunTech. Mankiet ma znaczniki zakresu po obydwu stronach - wewnątrz i zewnątrz - aby zapewnić prawidłowy dobór rozmiaru.

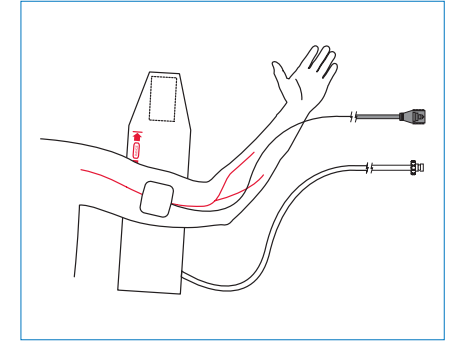


## Etap 5

Owiń dokładnie mankiety wokół ramienia. Znacznik oznaczający tętno powinien znajdować się nad tętnicą ramionową, jak pokazano poniżej.

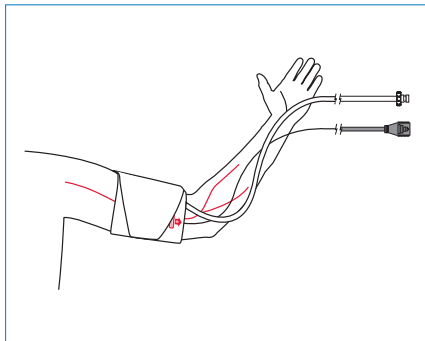


## Etap 6

Wprowadź kabel mikrofonu do gniazka, jak pokazano poniżej. Gniazka można wprowadzić w dowolnym położeniu. Po uzyskaniu prawidłowego połączenia będzie słyszalne wyrażenie kliknięcia.

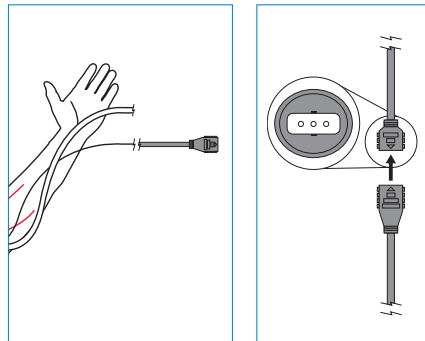

## Etap 7

Podłącz przewód mankietu do gniazka kabla pacjenta w urządzeniu Tango M2, jak pokazano poniżej.

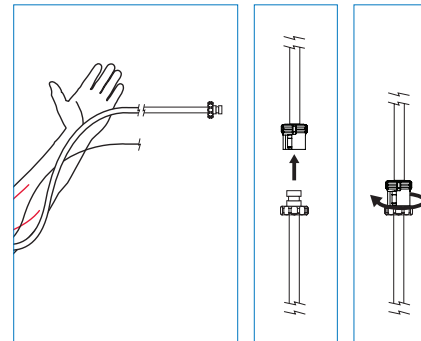

## Etap 8

Użyj pasek nadgarstkowych dostarczonych wraz z systemem Tango M2, aby umocować kabel pacjenta i kabel mikrofonu do nadgarstka pacjenta, jak pokazano poniżej.

