


## Orbit-K™ Uygun Manşon Yerleştirme Tekniği


### Adım 1

Triseps ile biceps arasında brakial arteri palpasyonla bulun.

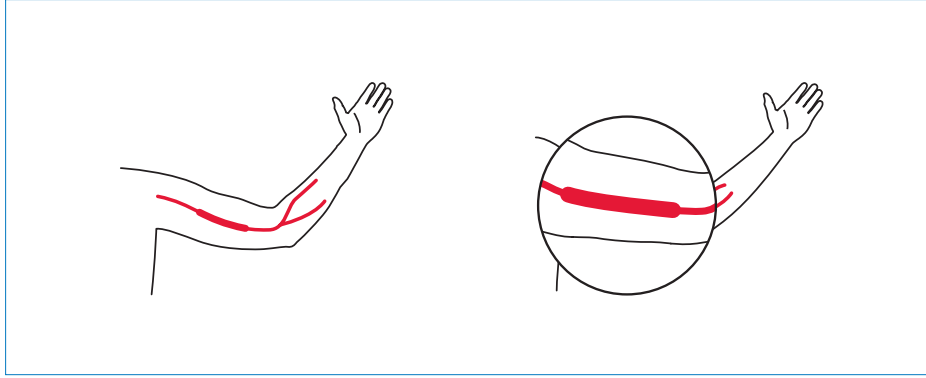


### Adım 2

Uygun büyüklükte man on seçin. Man onun uygun büyüklük belirlemeyi sağlamak üzere hem içinde hem dışta aralıkları vardır.

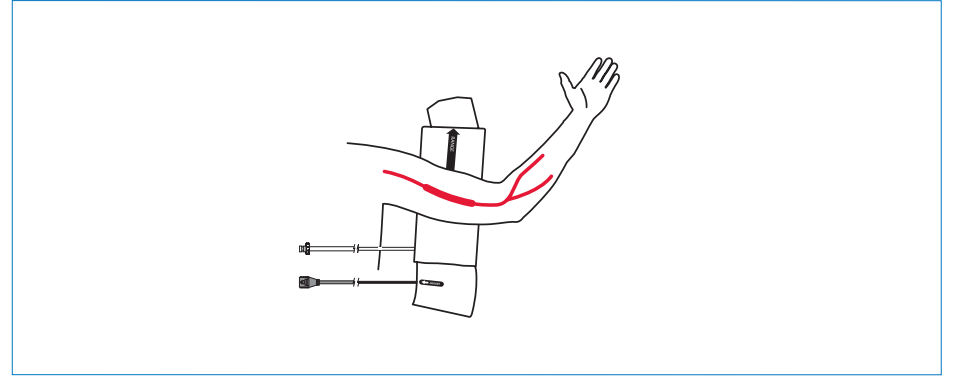


### Adım 3

Man onu kola yerleştirin. Arterin yerinin kolda aya doğru bakıldığında ve mikrofonun dirsekten 3-5 cm uzakta, brakial arter üzerine yerleştirildiğinden emin olun.

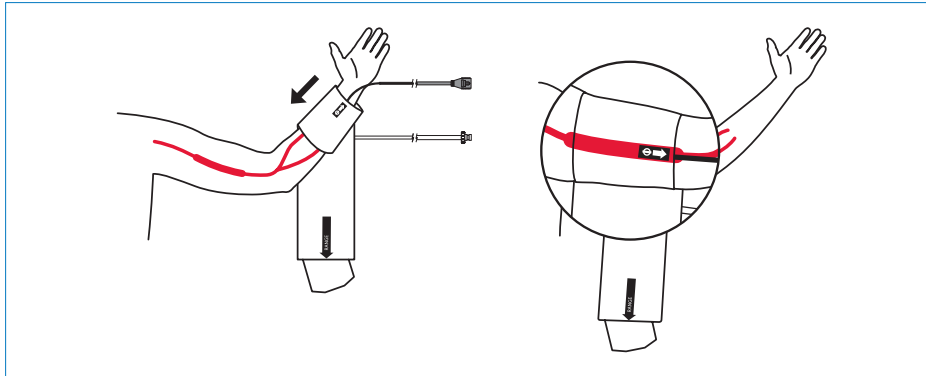

### Adım 4


Man onu kol etrafına sıkıca sarın. Hem hasta kablosu hem mikrofon kablosunu ayağın bileğine sabitlemek için Tango M2 sistemiyle sağlanan bilek eritlerini kullanın.

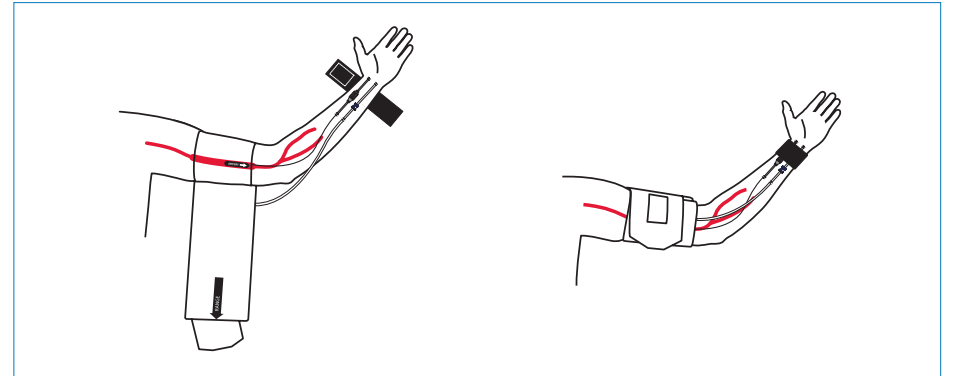

# Tek Hastada Kullanımlık Uygun Manşon Yerleştirme Kılavuzu


## Adım 1

Mikrofonu gösterildi i gibi mikrofon pedi içine yerle tirin. Yapı kan yüzey mikrofonu mikrofon pedi içinde tutar.

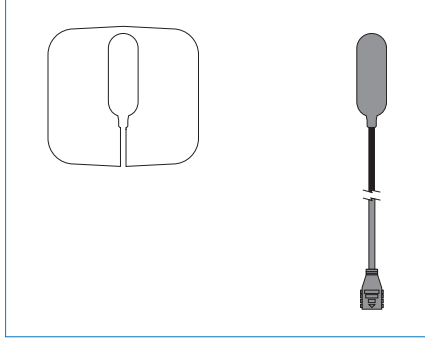


## Adım 2

Mikrofon pedi üzerindeki koruyucu kaplamayı a a ıda gösterildi i gibi soyun.

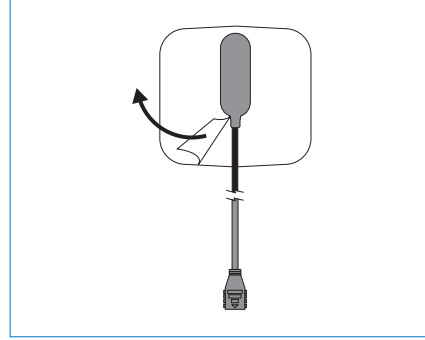


## Adım 3

Mikrofon yerle tirme *Tango M2* performansı için çok önemlidir. Mikrofonu biseps ile triceps kasları arasına, brakial arter üzerine yerle tirin (yakla ık olarak dirsek katlantısının 2 parmak üstüne).

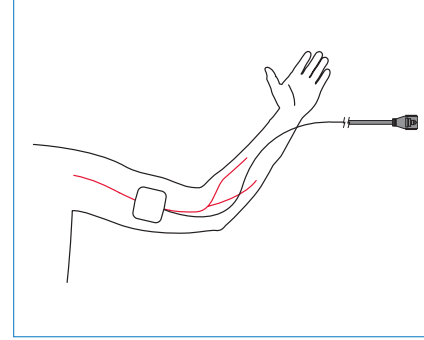


## Adım 4

Uygun büyüklükte *SunTech* tek kullanımlık man onu seçin. Man onun uygun büyüklük belirlemeyi sa lamak üzere hem içinde hem dı nda aralık i aretleri vardır.

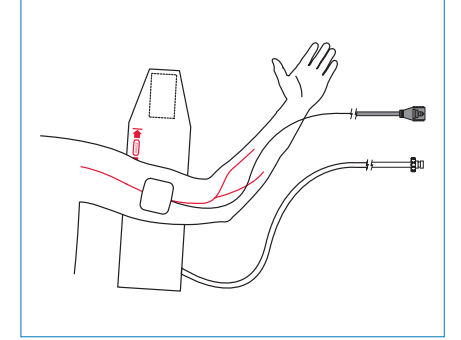


## Adım 5

Man onu sıkıca kol etrafına sarın. Arteriyel i aret a a ıda gösterildi i gibi brakial arter üzerinde olmalıdır.

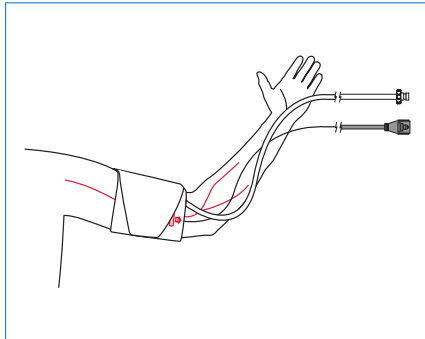


## Adım 6

Mikrofon kablosunu konektör içine a a ıda gösterildi i gibi yerle tirin. Konektörler herhangi bir yönelimle yerle tirilebilir. Sa lam bir ba lantı yapıldı nda duyulabilir bir tıklama olacaktır.

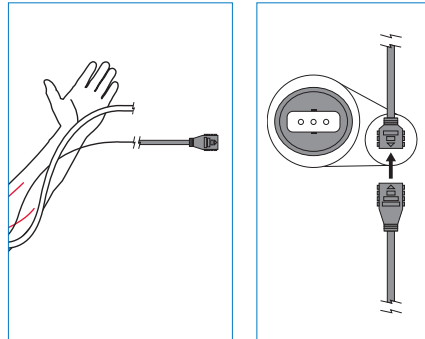

## Adım 7

Man on hortumunu a a ıda gösterildi i gibi *Tango M2* hasta kablosunun kablo konektörüne takın.

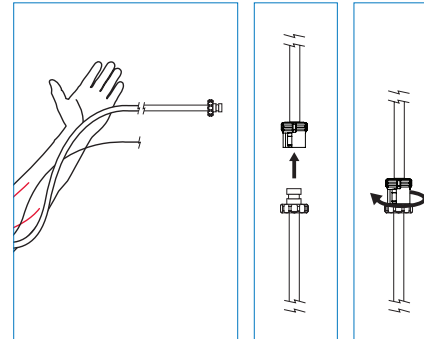

## Adım 8

Hem hasta kablosu hem mikrofon kablosunu a a ıda gösterildi i gibi hastanın bile ine sabitlemek için *Tango M2* sistemiyle sa lanan bilek eritlerini kullanın.

