

Tango M2 USB通信软件安装指导书

为了确保将Tango M2监护仪通过所提供的USB线缆，正确的连接到压力系统。USB-B 端需连接到监护仪上，USB-A 端需连接到压力系统。请注意，可能针对每种操作系统，操作说明略有不同，不过本文中每种操作系统的操作说明大致相近。

Window XP :

将Tango M2监护仪连接到压力系统。一旦连接会有窗口弹出，指出发现新硬件。按照以下步骤将USB通信软件安装到压力系统。

1. 将提供USB通信软件CD放入压力系统的CD光驱。
2. 在弹出的指出发现新硬件的窗口中选择“从指定位置安装”。
3. 接下来选择“搜索可移动媒体”（例如：CD）。
4. 接下来会弹出第二个窗口，询问你关于硬件的安装，如果你想继续安装，请确认硬件已经安装正确。询问的内容如下：“你正在为此硬件安装软件：Tango M2 serial over USB”。
5. 点击按钮“仍然继续”。
6. 软件安装需要一些时间，安装好后选择“完成”。

Window 7:

将Tango M2监护仪连接到压力系统。一旦连接会有窗口弹出，指出发现新硬件。

按照以下步骤将USB通信软件安装到压力系统。对于Windows7，是通过设备管理器，而不是硬件向导来安装通信软件。

1. 将提供USB通信软件CD放入压力系统的CD光驱。
2. 如果有窗口弹出，点击关闭它。
3. 在Window“开始”菜单，右击“计算机”，选择“设备管理器”（可能显示为“管理”）。
4. 在设备管理器中寻找“Tango M2虚拟串行接口”。你可能需要点击“其他设备”找到这个选项。
5. 选择“Tango M2虚拟串行接口”。一个窗口会弹出，选择“更新驱动软件”。
6. 这时会有另一个窗口弹出，窗口显示内容如下：你正在为此硬件安装软件：“Tango M2 serial over USB”
7. 点击按钮“仍然继续”。
8. 软件安装需要一些时间，安装好后选择“完成”。

Windows 10:

将Tango M2监护仪连接到压力系统。一旦连接会有窗口弹出，提示发现新硬件。

按照以下步骤将USB通信软件安装到压力系统。对于Windows10，是通过设备管理器来安装通信软件。

1. 将提供USB通信软件CD放入压力系统的CD光驱。
2. 右键点击Window“开始”菜单，选择“设备管理器”。
3. 在设备管理器中寻找“Tango M2虚拟串行接口”。你可能需要点击“其他设备”找到这个选

项。

4. 右键点击“Tango M2虚拟串行接口”。一个窗口会弹出，选择“更新驱动软件”。会有窗口弹出来提示“您想如何寻找您的软件驱动？”
5. 选择“浏览我的电脑”
6. 点击“浏览”按钮后选择CD盘
7. 点击“下一步”，会有弹窗跳出来提示“您想要安装此设备的驱动程序吗？”
8. 点击“安装”，软件安装需要一些时间，安装好后选择“完成”



如果对于安装有任何疑惑和问题，请联系顺泰医疗器材（深圳）有限公司：

联系地址：

深圳市宝安区观澜街道大和社区环观南路金雄达科技园 A 栋 2-3 楼

联系电话 (Tel)： 86-755-29588810

传真 (Fax)： 86-755-29588829